

1 TRAPLIFT BEDIENEN MET DE AFSTANDBEDIENING

Richt de afstandsbediening op de traplift. Gebruik de knoppen **OP** en **NEER** om de traplift naar u toe te brengen. Druk op de juiste knop en houd deze ingedrukt. De traplift reageert binnen 4 seconden. Laat de knop niet los tot de traplift stopt.

2 IN-/UITSTAPPEN: VOETENBORDES EN STOEL DRAAIEN

Klap het voetenbord en de armleuningen uit. Wilt u de stoel draaien om veilig plaats te nemen? Duw dan de hendel van de stoel (onder de gordel) naar beneden. Draai de stoel 90 graden naar u toe. Neem plaats en **doe de veiligheidsgordel om**. Draai de stoel met de hendel weer terug naar de normale stand.

LET OP: Stapt u uit? Draai dan **altijd** de stoel weer terug naar de normale stand. Anders kan de lift niet bediend worden met de afstandsbediening.

3 VEILIGHEIDSGORDEL OMDOEN

Nadat u plaats neemt in de stoel, doet u direct de gordel om rond uw middel. Controleer **altijd** de gordel voordat u de lift in beweging brengt.

4 TRAPLIFT BEDIENEN VANUIT DE STOEL

Aan het einde van de armleuningen bij uw hand vindt u de bedieningsknoppen. Duw de knop in de richting waar u naartoe wilt. De traplift maakt een piepton en **reageert binnen 4 seconden**. Houdt de bedieningsknoppen op de armleuningen ingedrukt. De lift stopt automatisch op het eindpunt. Stopt de lift doordat u de knoppen te vroeg loslaat? Laat beide knoppen dan even los en druk deze opnieuw in.

LET OP: Zorg dat de lift op het **uiterste einde van de rails** staat voordat u uitstapt. Anders kan de accu van de lift niet opladen.

5 OBSTAKELS OP DE TRAP?

Geen probleem. De traplift stopt automatisch door middel van veiligheidssensoren. Zodra het obstakel verwijderd is, kunt u de traplift weer bedienen.

BEKIJK DE
INSTRUCTIEFILM



SCAN ME



6

VEELGESTELDE VRAGEN

1. **Wat als de stoel niet recht staat?** ► De traplift zal niet functioneren.
2. **Wat als een traplift blijft piepen?** ► De traplift staat niet maximaal boven of beneden.
3. **Wat als meerdere trapliften tegelijkertijd piepen?** ► De trapliften krijgen geen stroom. Controleer de hoofdzekering in de meterkast van het gebouw.
4. **Wat als de traplift niet reageert op de afstandsbediening?** ► Controleer of u goed op de blauwe sensor richt, of de zitting recht staat of vervang de batterij van de afstandsbediening.
5. **Het touwtje van de afstandsbediening is te kort om de lift naar boven/beneden te gaan. Wat nu?** ► Als u op de stoel zit, gebruikt u de bedieningsknop op de arMLEuning bij uw hand.

Is uw vraag niet beantwoord? Neem contact op met +31(0) 182 74 40 50

7

(FOUT)MELDINGEN

Aan de zijkant van de traplift zit een display (bij de rails, zie afbeelding 5). Het display geeft met een code weer wat op dat moment de status is van de lift. Controleer de code aan de hand van de onderstaande uitleg.

E1	De lift wordt opgeladen.	[REDACTED]	De lift ontvangt geen stroom of staat in slaapstand.
E4	De lift is volledig opgeladen.		
E5	Storing in de accu. Bel Reco Lift Solutions: +31(0) 182 74 40 50		
A1	De lift staat niet geheel boven of beneden en wordt hierdoor NIET opgeladen. U hoort een piepsignaal. 		
A2-5	De lift verplaatst zich naar boven of beneden.		
E1	De onderste veiligheidssensor van de voetsteun is ingeschakeld. Verwijder het obstakel en bedien de lift opnieuw.		
E2	De bovenste veiligheidssensor van de voetsteun is ingeschakeld. Verwijder het obstakel en bedien de lift opnieuw.		
E3	De veiligheidssensor van de bovenzijde is ingeschakeld. Verwijder het obstakel en bedien de lift opnieuw.		
E4	De veiligheidssensor aan de onderzijde van de lift is ingeschakeld. Verwijder het obstakel en bedien de lift opnieuw.		
E5	De stoel staat niet in de juiste positie. Zet de stoel recht en bedien de lift opnieuw.		
E8	De batterij is bijna leeg. Verplaats de lift naar het dichtstbijzijnde laadpunt en laad de lift minimaal 1 uur op.		
H1-4	Bel Reco Lift Solutions: +31(0) 182 74 40 50		
F1-7	Bel Reco Lift Solutions: +31(0) 182 74 40 50		

Reco Lift Solutions B.V.

Containerweg 2a
2742 RA Waddinxveen
Nederland

info@recolift.com
+31(0) 182 74 40 50
www.recolift.com

