

1 TRAPLIFT BEDIENEN MET DE AFSTANDSBEDIENING

Richt de afstandsbediening op de traplift. Gebruik de knoppen **OP** en **NEER** om de traplift naar u toe te brengen. Druk op de juiste knop en houd deze ingedrukt. De traplift reageert binnen 2 seconden. Laat de knop niet los tot de traplift stopt.

2 IN-/UITSTAPPEN: VOETENBORDES EN STOEL DRAAIEN

Klap het voetenbord en de armleningen uit. Wilt u de stoel draaien om veilig plaats te nemen? Duw dan de hendel rechts van de stoel (onder de gordel) naar beneden. Draai de stoel 90 graden naar u toe. Neem plaats en **doe de veiligheidsgordel om**. Draai de stoel met de hendel weer terug naar de normale stand.

LET OP: Stapt u uit? Draai dan **altijd** de stoel weer terug naar de normale stand. Anders kan de lift niet bediend worden met de afstandsbediening.

3 VEILIGHEIDSGORDEL OMDOEN

Nadat u plaats neemt in de stoel, doet u direct de gordel om rond uw middel. Controleer **altijd** de gordel voordat u de lift in beweging brengt.

4 TRAPLIFT BEDIENEN VANUIT DE STOEL

Aan het einde van de armlening bij uw hand vindt u de bedieningsknop. Duw de knop in de richting waar u naartoe wilt. De traplift maakt een pieptoon en **reageert binnen 2 seconden**. Houd de bedieningsknop op de armlening ingedrukt. De lift stopt automatisch op het eindpunt. Stopt de lift doordat u de knop te vroeg loslaat? Laat de knop dan even los en druk hem opnieuw in.

LET OP: Zorg dat de lift op het **uiterste einde van de rails** staat voordat uitstapt. Anders kan de accu van de lift niet opladen.

5 OBSTAKELS OP DE TRAP?

Geen probleem. De traplift stopt automatisch door middel van veiligheidssensoren. Zodra het obstakel verwijderd is, kunt u de traplift weer bedienen.

**BEKIJK DE
INSTRUCTIEFILM**



SCAN ME



6

VEELGESTELDE VRAGEN

1. **Wat als de stoel niet recht staat?** ► De traplifft zal niet functioneren.
2. **Wat als een traplifft blijft piepen?** ► De traplifft staat niet maximaal boven of beneden.
3. **Wat als meerdere traplifften tegelijkertijd piepen?** ► De traplifften krijgen geen stroom. Controleer de zekeringen.
4. **Wat als de traplifft niet reageert op de afstandsbediening?** ► Controleer of u goed op de sensor richt, of de zitting recht staat of vervang de batterij van de afstandsbediening.
5. **Het touwtje van de afstandsbediening is te kort om de lifft naar boven/beneden te gaan. Wat nu?** ► Als u op de stoel zit, gebruikt u de bedieningsknop op de armluning bij uw hand.

Is uw vraag niet beantwoord? Neem contact op met +31(0) 182 74 40 50

7

(FOUT)MELDINGEN

Aan de zijkant van de traplifft zit een display (bij de rails, zie afbeelding 7). Het display geeft met een code weer wat op dat moment de status is van de lifft. Controleer de code aan de hand van de onderstaande uitleg.

C1-5

De lifft wordt opgeladen. Hoe hoger het getal, hoe voller de accu.

De lifft ontvangt geen stroom of staat in slaapstand.

A1

De lifft staat niet geheel boven of beneden en wordt hierdoor **NIET** opgeladen. U hoort een piepsignaal. 

A2-5

De lifft verplaatst zich naar boven of beneden.

E1

De onderste veiligheidssensor van de voetsteun is ingeschakeld. Verwijder het obstakel en bedien de lifft opnieuw.

E2

De bovenste veiligheidssensor van de voetsteun is ingeschakeld. Verwijder het obstakel en bedien de lifft opnieuw.

E4

De veiligheidssensor aan de onderzijde van de lifft is ingeschakeld. Verwijder het obstakel en bedien de lifft opnieuw.

E5

De veiligheidssensor aan de bovenzijde van de lifft is ingeschakeld. Verwijder het obstakel en bedien de lifft opnieuw.

E6

De stoel staat niet in de juiste positie. Zet de stoel recht en bedien de lifft opnieuw.

E7

De batterij is bijna leeg. Verplaats de lifft naar het dichtstbijzijnde laadpunt en laad de lifft minimaal 1 uur op.

H1-2

Bel RECO Lift Solutions: +31(0) 182 74 40 50

F1-7

Bel RECO Lift Solutions: +31(0) 182 74 40 50

RECO Lift Solutions B.V.

Containerweg 2a
2742 RA Waddinxveen
Nederland

info@reco-lift.eu
+31(0) 182 74 40 50
www.reco-lift.eu

RECO
LIFT SOLUTIONS