

1 **BEDIENUNG DES TREPPENLIFTS MIT DER FERNBEDIENUNG**

Richten Sie die Fernbedienung auf den Treppenlift. Benutzen Sie die **AUF-** und **AB-**Tasten, um den Treppenlift zu Ihnen hin zu bewegen. Drücken und halten Sie die rechte Taste. Der Treppenlift wird innerhalb von 4 Sekunden reagieren. Lassen Sie den Knopf erst los, wenn der Treppenlift anhält.

2 **EINSTEIGEN/AUSSTEIGEN: TRITTBRETT UND SITZ DREHBAR**

Klappen Sie das Fußteil und die Armlehnen aus. Möchten Sie den Stuhl drehen, um sich sicher hinsetzen zu können? Drücken Sie den Hebel auf der rechten Seite des Stuhls (unterhalb des Gurtes) nach unten. Drehen Sie den Sitz um 90 Grad zu sich hin. Setzen Sie sich hin und schnallen Sie sich an. Drehen Sie den Sitz mit Hilfe des Hebels in die normale Position zurück.

HINWEIS: Verlassen Sie den Treppenlift? Bringen Sie den Sitz immer in die normale Position. Andernfalls kann der Lift nicht mit der Fernbedienung bedient werden.

3 **ANLEGEN DES SICHERHEITSGURTES**

Nachdem Sie sich auf den Stuhl gesetzt haben, legen Sie sofort den Sicherheitsgurt um Ihre Taille. Prüfen Sie den Gurt immer, bevor Sie den Lifter bewegen.

4 **BEDIENUNG DES TREPPENLIFTS VOM SESSEL AUS**

Am Ende der Armlehne neben der Hand befindet sich die Steuerungstaste. Drücken Sie die Taste in die gewünschte Richtung. Der Treppenlift piept und reagiert innerhalb von 4 Sekunden. Drücken Sie die Steuertaste an der Armlehne und halten Sie sie gedrückt. Der Aufzug hält automatisch am Endpunkt an. Wird der Aufzug gestoppt, weil Sie den Knopf zu früh loslassen? Lassen Sie die Taste los und drücken Sie sie erneut.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich vor dem Aussteigen, dass sich der Lift am äußersten Ende der Schienen befindet. Andernfalls kann der Akku des Lifts nicht aufgeladen werden.

5 **HINDERNISSE AUF DER TREPPE?**

Kein Problem. Der Treppenlift stoppt automatisch mit Hilfe von Sicherheitssensoren. Sobald das Hindernis beseitigt ist, können Sie den Treppenlift wieder bedienen.

SEHEN SIE SICH DAS ANLEITUNGSVIDEO AN



SCAN ME




6 HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. **Was ist, wenn der Stuhl nicht gerade ist?** ► Der Treppenlift funktioniert nicht
2. **Was ist, wenn der Treppenlift ständig piept?** ► Der Treppenlift befindet sich nicht in der maximalen Auf- oder Abwärtsposition.
3. **Was passiert, wenn mehrere Treppenlifte gleichzeitig piepen?** ► Die Treppenlifte werden nicht mit Strom versorgt. Sicherungen prüfen
4. **Was ist, wenn der Treppenlift nicht auf die Fernbedienung reagiert?** ► Prüfen Sie, ob der Sensor richtig ausgerichtet ist, ob der Sitz gerade ist oder tauschen Sie die Batterie der Fernbedienung aus
5. **Die Schnur an der Fernbedienung ist zu kurz, um den Aufzug hoch/runter fahren zu lassen. Was ist zu tun?** ► Wenn Sie auf dem Stuhl sitzen, betätigen Sie die Bedientaste an der Armlehne mit der Hand.

Ist Ihre Frage nicht beantwortet? Bitte kontaktieren Sie +31(0) 182 74 40 50

7 (FEHLER-)MELDUNGEN

An der Seite des Treppenlifts befindet sich eine Anzeige (in der Nähe der Schienen, siehe Abbildung 5). Auf dem Display wird der aktuelle Zustand des Aufzugs durch einen Code angezeigt. Überprüfen Sie den Code anhand der nachstehenden Erklärung.

| | | | |
|-------------|--|-----------|--|
| C1 | Der Aufzug wird geladen. | C2 | Der Aufzug wird nicht mit Strom versorgt oder befindet sich im Ruhezustand |
| C4 | Der Aufzug ist vollständig aufgeladen. | | |
| C5 | Batterieausfall. Rufen Sie Reco Lift Solutions an: +31(0) 182 74 40 50 | | |
| A1 | Der Lift ist nicht ganz oben oder unten und lädt daher NICHT. Sie hören einen Piepton  | | |
| A2-5 | Der Aufzug fährt nach oben oder unten. | | |
| E1 | Der untere Sicherheitssensor der Fußstütze ist eingeschaltet. Entfernen Sie das Hindernis und nehmen Sie den Lift wieder in Betrieb. | | |
| E2 | Der obere Sicherheitssensor der Fußstütze ist eingeschaltet. Entfernen Sie das Hindernis und bedienen Sie den Lift erneut. | | |
| E3 | Der obere Sicherheitssensor ist eingeschaltet. Entfernen Sie das Hindernis und fahren Sie den Lift erneut. | | |
| E4 | Der Sicherheitssensor an der Unterseite des Lifts wird aktiviert. Entfernen Sie das Hindernis und fahren Sie den Lift erneut. | | |
| E5 | Der Sitz ist nicht in der richtigen Position. Richten Sie den Sitz auf und bedienen Sie den Lift erneut. | | |
| E8 | Die Batterie ist schwach. Fahren Sie den Aufzug zur nächsten Ladestation und laden Sie ihn mindestens 1 Stunde lang auf. | | |
| H1-4 | RECO aufrufen: +31(0) 182 74 40 50 | | |
| F1-7 | RECO aufrufen: +31(0) 182 74 40 50 | | |

Reco Lift Solutions B.V.

Containerweg 2a
2742 RA Waddinxveen
Nederland

info@recolift.com
+31(0) 182 74 40 50
www.recolift.com/de

Recolift
solutions 